

# BURUN İÇİ NUMUNE ALIM TALİMATI

## NUMUNE ALMA DONANIMI


- Numune Çubuğu (1)
- Taşıma Tüpü (1)



## NUMUNE ALIMI




Elinizi su ve sabunla yıkayın

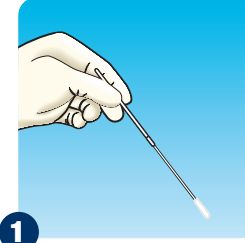


1

Numune çubuğunu paketinden çıkarın, pamuksuz kısımdan tutarak kırma noktasını belirleyin

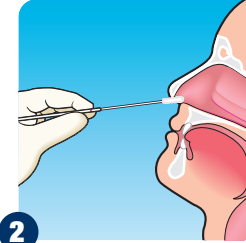

2


Numune Çubuğunu burun deliğine yaklaşık 1-1,5 cm kadar yavaşça itin

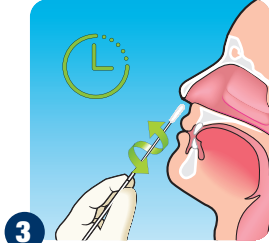

3

- Burun deliğine yerleştirdiğiniz numune çubuğunu 5-10 saniye kadar her iki yöne çevirerek sürün
- Numune çubuğunu çıkartın ve aynı işlemi diğer burun deliği için tekrarlayın. Sonra numune çubuğunu çıkartın

## NUMUNE YERLEŞTİRME

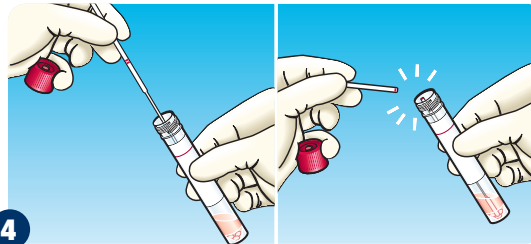

4

Numune çubuğunu tutarken taşıma tüpünün kapağını açın

- Numune çubuğunu tüpün içine kırma noktası tüpün ağzıyla aynı düzeyde oluncaya kadar içeri sokun
- Numune çubuğunu bükerek kırma noktasından kırın. Tamamen ayrılmazsa hafifçe çevirebilirsiniz.



5

Numune çubuğunun kırılan parçasını uygun bir çöp kutusuna atın



Eliniz su ve sabunla temizleyin